

唾液検体での提出方法

2020.06

株式会社マイクロスカイラボ



(滅菌済)
唾液採取
キット




お願い

症状発症から
9日以内の方の
採取をしてください。

※注) 採取30分前から飲食、喫煙、歯磨き、口内洗浄はお控えください。


1

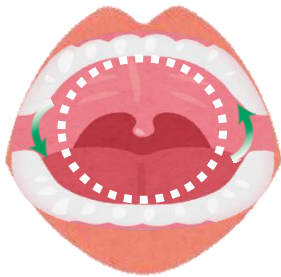

① 自然に分泌される唾液を
口の中に溜めます。

■手をアルコール消毒し、乾いた手で容器に触れてください。

2

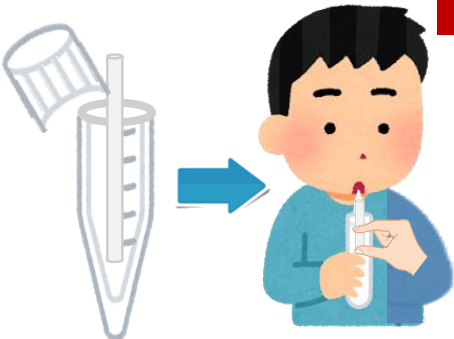

注意
点

*容器の中の採取用のストローは、手をアルコール消毒し乾いた手の状態で取出して下さい。
*外側に唾液が付かないよう、ご注意ください。

② キャップを外し、口に溜まった唾液を、中に入っているストローに口をつけ、ゆっくり吐き出します。(消毒後の手でストローを支えて頂いて構いません)
5~10分間かけると、1~2ml採取できます。


3



この目盛り
指をあてながら行うと
適量採取しやすいです。

③ 容器の一番下の目盛りまで
唾液が入っていることを
確認して下さい。

4

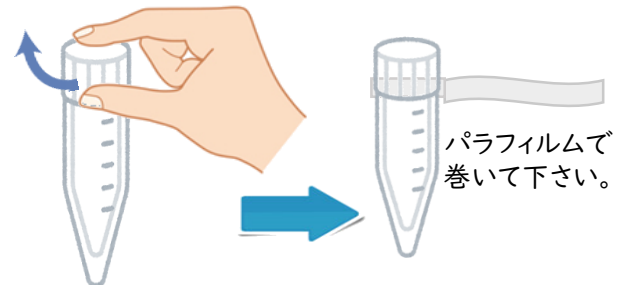

パラフィルムで
巻いて下さい。

④ ストローを入れたまま、
容器のキャップをしっかりと締め、
必ず容器全体をアルコール等で
拭取り、パラフィルムでしっかり
巻いて下さい。

■採取後は冷蔵保管をして下さい。
検査までに48時間以上かかる場合は-80℃保存とし、-80℃フリーザーがない場合は-20℃保存をして下さい。